

Vastrip® 2+

De flexibele stripper



Nieuw:
verstelbaar handvat

Vastrip® 2+ is een product van uitstekende kwaliteit dat gemakkelijk aangepast kan worden aan verschillende venenstriptechnieken.

Het strippen van venen is een standaard ingreep bij de behandeling van spataderen. Het resultaat op lange termijn is beter dan sclerotherapie (1) of saphenofemorale ligatie (2). Vastrip® 2+ is een veelgebruikte venenstripper van hoge kwaliteit, die over unieke flexibiliteit beschikt. Het inbrengen kan in beide richtingen worden uitgevoerd door gebruik te maken van de rechte of de spiraalvormige tip. Bij conventioneel strippen kan de geselecteerde olijf op beide uiteinden van de stripper geplaatst worden, waardoor zowel strippen door terugtrekken als doortrekken mogelijk is.

Door het plaatsen van een ligatuur door de opening in de tip kan Vastrip® 2+ als alternatief gebruikt worden voor invaginatie of ministrippen. Het handvat kan tijdens het strippen gefixeerd en ook weer verplaatst worden. De stripper en het handvat zijn steriel verpakt en klaar voor gebruik.

- geschikt voor conventioneel, invaginatie of ministrippen
- gemakkelijk in te brengen en te controleren tijdens de hele operatie
- twee-weg stripper met spiraalvormige en rechte tip
- inclusief 3 olijven (9, 12, 15 mm)
- verstelbaar handvat voor optimale trekkracht


Verpakking

Vastrip® 2+ wordt geleverd in een steriele verpakking.




Olijven


Keuze uit 3 maten olijven.

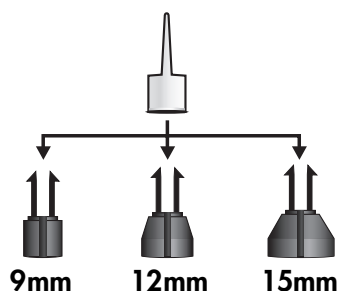

Rechte tip

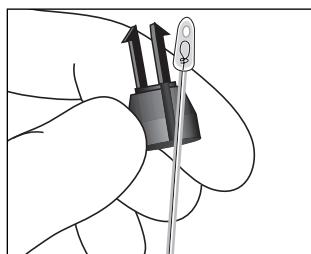


Spiraalvormige tip

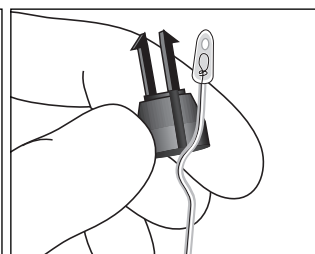

De tip is recht of spiraalvormig en bevat een opening voor een ligatuur bij het invaginatie strippen.

Handvat

Een van de unieke eigenschappen van Vastrip® 2+ is het verstelbare handvat. Het handvat geeft optimale trekkracht tijdens het strippen van de venen.

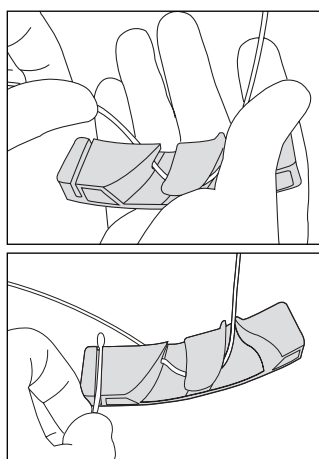

Beschrijving

Materiaal

Roestvrijstaal (kern van de stripper), Polycarbonaat (coating van de stripper en de tips), Acetaat (olijven), ABS (handvat).

Sterilisatie

De producten zijn gesteriliseerd door middel van ethyleenoxide.

Enmalig gebruik

Alle bestanddelen zijn alleen bestemd voor eenmalig gebruik.

Niet te gebruiken bij een open of beschadigde verpakking.

PRODUCTASSORTIMENT – VASTRIP® 2+

Ref.	Verpakking
67321	1x10

CE 0088

STERILE EO



Single use/Monouso/Enmalig gebruik
Einmalgebrauch/Usage unique

Referenties:

1. Einarsson E, Eklöf B, Neglén P. Sclerotherapy or surgery as treatment for varicose veins: a prospective randomized study. *Phlebology* 1993;8:22-26.
2. Dwerryhouse S. Stripping the long saphenous vein reduces the rate of reoperation for recurrent varicose veins: five-year results of a randomized trial. *Journal of Vascular Surgery*, 1999;29:589-92.